

**w wellion®**

Ihre ÖSTERREICHISCHE Gesundheitsmarke

**RICHTIG  
BLUTZUCKER  
MESSEN**



THE MEDICAL SERVICES COMPANY



- GROSSE ZAHLEN
- MAHLZEITEN-MARKER
- EINFACHE HANDHABUNG

# Richtige Aufbewahrung des Gerätes

- Lagertemperatur beachten
- Betriebstemperatur beachten

Wenn die Umgebungstemperatur außerhalb der Betriebstemperatur des Messgerätes liegt, müssen Sie warten, bis die Betriebstemperatur erreicht ist (ca. 30 Minuten).

## 1. Vorbereitung

- Messgerät und Teststreifen **VOR** der Blutprobengewinnung vorbereiten



## 2. Sauberkeit

- Hände gründlich waschen und abtrocknen
- Saubere und trockene Punktionsstelle verwenden



## 3. Stechhilfe vorbereiten

- Verstellbare Kappe abschrauben



**w**wellion®

**LUNA** *trio*



GLU,  
CHOL  
& UA

- AUSWURFTASTE
- KEIN KODIEREN (GLUKOSEMESSUNG)
- ZUSATZFUNKTIONEN:  
CHOLESTERIN- UND  
HARNSÄURE  
MESSUNG



THE MEDICAL SERVICES COMPANY

# wellion® FINGER CREAM



- IDEAL FÜR DIE FINGERPFLEGE BEI DIABETIKERN
- PFLEGECREME FÜR FINGERSPITZEN



THE MEDICAL SERVICES COMPANY

- Lanzette einführen
- Schutzkappe der Lanzette abdrehen



- Verstellbare Kappe wieder aufschrauben
- Stechtiefe einstellen (1 = am wenigsten tief, 10 = am tiefsten)




- Hintere Kappe zurückziehen, bis ein Klicken zu hören ist
- Auslöseknopf ist nun rot



## 4. Teststreifen vorbereiten


- **Ablaufdatum** auf Teststreifendose beachten
- **Lagertemperatur** beachten
- Teststreifendose nach Streifenentnahme **SOFORT** schließen
- **KEINE** feuchten, beschädigten oder abgelaufenen Teststreifen verwenden
- Teststreifen **NICHT** mit nassen oder schmutzigen Händen berühren
- Teststreifenende für Blutprobe **NICHT** berühren

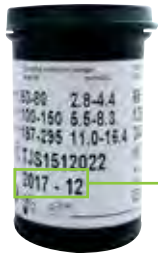

Ablaufdatum



Lager-  
temperatur

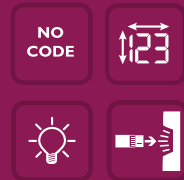

- **KEIN KODIEREN**
- **ZUSATZFUNKTION: KETONMESSUNG**
- **BELEUCHTETER TESTSTREIFEN-EINSCHUB**



THE MEDICAL SERVICES COMPANY

# wellion® 1SHOT



**TURBO-  
ENERGIESPENDER  
MIT GESCHMACK**



THE MEDICAL SERVICES COMPANY

## 5. Teststreifen einführen

- Teststreifen einführen
- Teststreifenende für Blutprobe **NICHT** berühren



## 6. Blutgewinnung

- Stechhilfe an die gewünschte Punktionsstelle pressen
- Auslöseknopf drücken, um zu stechen



# 7. Messung durchführen

- Teststreifenspitze in den Blutstropfen eintauchen
- Blutstropfen wird automatisch aufgesaugt
- Teststreifenspitze in den Blutstropfen halten, bis ein Piepton zu hören ist
- Piepton = genügend Blut für die Messung vorhanden
- Ergebnis erscheint nach einem 6-Sekunden-Countdown
- Gebrauchten Teststreifen entfernen und ordnungsgemäß entsorgen



**w**wellion®  
**WAVE**

*Blutdruckmessgerät  
für das Handgelenk*



**w**wellion®  
**WAVE** *professional*

*Blutdruckmessgerät  
für den Oberarm*



**MED TRUST**

THE MEDICAL SERVICES COMPANY

wellion®  
CALLA mini



NO  
CODE



- KEIN KODIEREN
- KLEIN UND HANDLICH
- GROSSE ZAHLEN



## 8. Ergebnis interpretieren

- Idealbereich des Blutzuckerwerts für Erwachsene ohne Diabetes:
  - weniger als 100 mg/dl (5,6 mmol/l) vor dem Essen
  - weniger als 140 mg/dl (7,8 mmol/l) nach dem Essen<sup>(1)</sup>
- Sprechen Sie mit Ihrem betreuenden Arzt und dem medizinischen Fachpersonal über einen für Sie geeigneten Zielbereich.
- „HI“: Der Blutzuckerwert könnte höher als 600 mg/dl (33,3 mmol/l) sein.
- „LO“: Der Blutzuckerwert könnte niedriger als 20 mg/dl (1,1 mmol/l) sein.
- Wiederholen Sie die Messung an der Fingerbeere. Erhalten Sie dasselbe Ergebnis noch einmal, ziehen Sie Ihren betreuenden Arzt oder medizinisches Fachpersonal zurate.

Referenz:

(1) American Diabetes Association Position Statement: Standards of Medical Care in Diabetes, 2010. Diabetes Care, 2010, 33 (Suppl. 1): 11–61.



## 9. Pflege und Lagerung des Messgerätes

- Bei Verunreinigung des Messgeräts verwenden Sie ein feuchtes (KEIN NASSES), fusselfreies Tuch mit einer milden Reinigungslösung.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Messgerät eindringt. Tauchen Sie das Messgerät niemals unter Wasser und halten Sie es niemals unter fließendes Wasser.
- Verwenden Sie keine Glas- oder Haushaltsreiniger für das Messgerät.
- Versuchen Sie nicht, die Öffnung für die Teststreifen zu reinigen.
- Behandeln Sie das Messgerät sorgfältig – wenn schwere Erschütterungen (z. B. beim Herunterfallen des Messgeräts) auftreten, könnte die Elektronik beschädigt werden.
- Betriebstemperatur des Messgerätes und des Teststreifens beachten.
- Vermeiden Sie es, das Messgerät an extrem heißen oder kalten Orten aufzubewahren (z. B. nahe einer Heizquelle oder in einem extrem heißen bzw. kalten Auto).
- Vermeiden Sie es, das Messgerät oder die Teststreifen an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit zu lagern oder zu benutzen (z. B. im Badezimmer oder in der Küche).
- Verschließen Sie den Deckel der Teststreifendose immer unmittelbar nach der Entnahme eines Teststreifens und vergewissern Sie sich, dass er fest geschlossen ist.
- Zerlegen Sie das Messgerät nicht in seine Einzelteile. Dadurch würde die Garantie erlöschen. Bei technischen Problemen oder Fragen wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhändler und bitten um Unterstützung.

**w**wellion®  
*Skin Care Cream*



• **MIT 10% UREA  
FÜR BESONDERS  
INTENSIVE PFLEGE**

• **SCHUTZ GEGEN  
TROCKENE HAUT**



THE MEDICAL SERVICES COMPANY



# wellion<sup>®</sup> *Club*

- **Erstklassige Wellion Produkte**
- **Professioneller Service**
- **Spezielle Angebote nur für Mitglieder**

**Registrieren Sie sich jetzt GRATIS und unverbindlich zum Wellion CLUB und profitieren Sie von den vielen Wellion CLUB Vorteilen.**

## **Ihre Wellion Vorteile:**

- **Int. Diabetikerausweis - Clubkarte**

Personalisiert und im praktischen Scheckkartenformat - Kann auf Reisen als internationaler Diabetikerausweis verwendet werden (in deutsch und englisch)

- **Kostenlose Batterien**

1 x pro Jahr - für Ihr Wellion Blutzuckermessgerät

- **Kostenloses Wellion Messgerät**

Ihrer Wahl bei der Anmeldung zum Wellion CLUB, Details zu allen Geräten finden Sie unter [www.wellion.eu/de](http://www.wellion.eu/de)

- **Wellion Diabetestagebuch / Wellion Blutzuckerpass**

Bestellen Sie GRATIS Ihr persönliches Wellion Tagebuch oder Ihren persönlichen Wellion Blutzuckerpass



• **Wellion Informationsportal**

Aktuelles finden Sie im Internet unter [www.wellion.eu/de](http://www.wellion.eu/de)

Hier finden Sie nützliche Infos zum Thema Diabetes, Informationsmaterialien und Bedienungsanleitungen zum Downloaden

• **Wellion Kundenservice**

Wir sind für Sie da: **Mo - Fr: 8:00 bis 17:00 Uhr**  
**Tel.: (+49) 035205 / 469-10**

**MED TRUST GmbH**  
**Bergener Ring 17-19**  
**01458 Ottendorf - Okrilla**

Die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für den Wellion® CLUB der MED TRUST GmbH Deutschland, unsere Datenschutzerklärung und eine Übersicht der Wellion Club Leistungen, finden Sie unter [www.wellion.eu/de](http://www.wellion.eu/de).

**Wellion CLUB & Service-Vorteil Registrierung**

JA, ich möchte kostenfrei Mitglied im Wellion CLUB werden und viele CLUB-Vorteile in Anspruch nehmen.  
(Bitte Karte vollständig und leselich in Großbuchstaben ausfüllen)

Wellion Geräte-Typ: \_\_\_\_\_

Wellion Geräte-Nr.: \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

e-Mail \_\_\_\_\_

Geb.Datum \_\_\_\_\_  
Ich willige ein, dass die MED TRUST GmbH, Bergener Ring 17-19, D - 01458 Ottendorf-Okrilla, in Folge als MED TRUST bezeichnet, meine oben angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Registrierung im Wellion Club und der Abwicklung der damit verbundenen Serviceleistungen, nämlich der Verwaltung der Zusatzgarantie, der Erstellung und Verwaltung des Diabetikerausweises, der Lieferung der jährlichen Gratis-Batterie, sowie der Zusendung regelmäßiger Informationen über Veranstaltungen und Produkte der MED TRUST per E-Mail und Post verarbeitet. Diese Einwilligung kann ich jederzeit, kostenfrei und ohne Angabe von Gründen bis zum Ende der Vertragsdauer schriftlich mittels einer Anrede an MED TRUST, Bergener Ring 17-19, D - 01458 Ottendorf-Okrilla widerrufen.

Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_

Bitte  
frankieren,  
falls Marke  
zur Hand.

Deutsche Post  
ANTWORT

**MED TRUST GmbH**  
**Bergener Ring 17-19**  
**01458 Ottendorf - Okrilla**

Tel.: (+49) 035205 / 469-10  
Fax: (+49) 035205 / 469 -19  
E-mail: [office@medtrust.de](mailto:office@medtrust.de)  
Web: [www.medtrust.de](http://www.medtrust.de)

WELL143M1TD-2018-03

# wellion® Club

## ANMELDUNG

Wählen Sie Ihr GRATIS Wellion Wunschmessgerät als Willkommensgeschenk.  
Nähere Informationen zu den Geräten finden Sie auf [www.wellion.eu/de](http://www.wellion.eu/de).

Bitte wählen Sie die Maßeinheit Ihres Wunschgerätes:  mg/dl  mmol/L

**CALLA***light*

- brombeere
- weiß



**CALLA***mini*

- petrol
- schwarz



**GALILEO**

- GLU/KET
- gelb

- GLU/CHOL
- weiß



**CALLA***classic*

- silber



**CALLA***dialog*

- 



**LUNA***trio*

- gelb
- pink
- schwarz
- weiß



**GALILEO***compact*

- 



# wellion®



Ihre  
**ÖSTERREICHISCHE**  
Gesundheitsmarke



THE MEDICAL SERVICES COMPANY

DEUTSCHLAND:  
MED TRUST GmbH

Bergener Ring 17-19 • D-01458 Ottendorf - Okrilla  
Tel.: (+49) 035205/ 469 10 • Fax: (+49) 035205/ 469 19  
e-mail: [office@medtrust.de](mailto:office@medtrust.de)  
[www.medtrust.de](http://www.medtrust.de) • [www.wellion.eu/de](http://www.wellion.eu/de)

ÖSTERREICH:  
MED TRUST Handelsges.m.b.H.  
Gewerbepark 10 • A-7221 Marz  
Tel.: (+43)02626/64190 • Fax: DW 77  
e-mail: [office@medtrust.at](mailto:office@medtrust.at)  
[www.medtrust.at](http://www.medtrust.at) • [www.wellion.at](http://www.wellion.at)